

SLIM MASTER

EQUIPO MULTIPLE CORPORAL

R.F. - ENDERMOLOGÍA - SONOFORESIS



Mando exclusivo combinado de Triple efecto: **destructor - drenante - estimulante** destruye los adipocitos, los líquidos y los elimina en un sólo acto.

Combinación única en un solo equipo: Radio frecuencia - VacuumTerapia - Sonoforesis

Rf bipolar en mando patentado 1Mhz
Vacuumterapia cromática combinada con Rf.
Sonoforesis 1Mhz

En facial favorece la fabricación de colágeno profundo. Eliminación de arrugas y tonificación.

ENERGY SLIM MASTER

3 equipos en 1

ENDERMOLOGÍA CROMO
RADIO FRECUENCIA

MAXIMOS RESULTADOS GARANTIZADOS

UNICO EN LA LUCHA CONTRA LA CELULITIS,
LA GRASA LOCALIZADA Y LA FLACIDEZ
EN SOLO 20 MINUTOS


- ✓ Destruye
- ✓ Elimina
- ✓ Tonifica
- ✓ Reduce
- ✓ Regenera
- ✓ Drena
- ✓ Estimula
- ✓ Bienestar

Atención al Cliente: +34 91 622 79 33 – info@rebeccadennise.com

ESTE FOLLETO TIENE CARÁCTER INFORMATIVO NO CONTRACTUAL, POR LO QUE PODRÁ SUFRIR MODIFICACIONES POR RAZONES TÉCNICAS O COMERCIALES

SLIM MASTER

ENERGY BEAUTY CARE

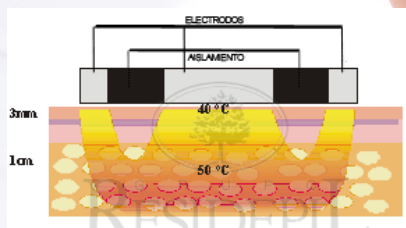

RADIOFRECUENCIA + EDERMOLOGÍA - CROMO:

La Radiofrecuencia Bipolar doble Acción EXCLUSIVA de nuestro equipo SLIM MASTER es el método más eficaz para la eliminación de grasa y reafirmación de tejidos.

El SLIM MASTER viene equipado con Radio Frecuencia Corporal combinada con Endermología Cromática y Radio Frecuencia Facial, y opcionalmente se le pueden añadir otros mandos como de solo Radio Frecuencia Corporal y Dermoabrasión Ultrasónica.



Mando Combi RF + Endermología Cromática

Gracias a nuestro mando exclusivo del Slim Master COMBI RF+VAC en menos tiempo destruimos la grasa con más energía que cualquier mando tradicional. Pudiendo asegurar que penetra a **más de 1 cm de profundidad**, por tanto llega hasta la hipodermis. Su triple efecto destructor, drenante y estimulante hacen que podamos destruir de forma inmediata los adipocitos, licuarlos y eliminarlos de forma natural a través del canal linfático y por la orina.

Ahora Grupo Residepil incorpora a su Radiofrecuencia doble Acción la eficacia del drenaje a través de la **Endermología Cromática**, y todo en un sólo mando, de esta forma SLIM MASTER hace más eficaz y rápidos los resultados en la lucha contra la eliminación de los adipocitos.



OPCIONAL Mando RF Corporal

Gracias al SLIM MASTER y a su exclusiva combinación de Radiofrecuencia y Endermología cromática eliminamos y drenamos la grasa, en tan sólo 20 minutos, sin necesidad de realizar drenajes computarizados o manuales. El efecto de la cromoterapia aumenta más aún el efecto activador en la zona de acúmulo, aportando a nuestro sistema exclusivo una eficacia inigualable.

MANDO RADIOFRECUENCIA: Energy SLIM MASTER a través de una transferencia de energía resistente se estimula la energía del interior de los tejidos biológicos, activando el proceso natural reparador y antiinflamatorio. Penetración de 1cm, llegando por tanto a la hipodermis siendo eficaz tanto en tratamientos faciales como corporales. La frecuencia del campo eléctrico es de 1Mhz.

Los mandos son bipolares: cuando está en contacto con la zona a tratar el equipo nota el contacto y después de dos segundos incrementa lentamente la potencia hasta el nivel seleccionado por el usuario. El tiempo inicial necesario para calentar una zona de 10 cm² a la temperatura de 41°C es alrededor de 10 segundos a la máxima potencia.

Cuatro programas: De forma preestablecida el SLIM MASTER ofrece cuatro programas con diferentes niveles de potencia para el tratamiento de alteraciones.



OPCIONAL Dermoabrasión ultrasónica

SLIM MASTER EFICAZ EN CELULITIS Y TERAPIAS DEL DOLOR

Gracias a nuestro mando exclusivo compuesto de dos electrodos realizamos doble calentamiento en menos sesiones produciendo un aumento intradérmico de hasta la Hipodermis de forma más eficaz y rápido, a más de 1cm de profundidad.

Atención al Cliente: +34 91 622 79 33 – info@rebecadennise.com

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Alimentación: 220V – 50 Hz – 120W max
- Fusibles: 2 x 2A.
- Display LCD gráfico de colores 320 x 240 puntos.
- Controlador video, memoria video 16 Mbyte, microprocesador 40Mhz.
- Teclado con 18 teclas de acceso inmediato y regulación del contraste por LCD.
- Compresos de vacuum 15 litros 220 V / 80 w por pistón
- Presión del vacuum regulable de panel.
- Frecuencia nominal: de 28 a 32 KHz
- Radiofrecuencia VARIABLE DE 0 A 100%(7 W max. FRQ. 1 MHz)
- Tiempo variable de 0 a 99 minutos
- Sensor de desactivación para el mando opcional de Radio Frecuencia corporal
- Mando de vacuum en plástico Delrin y plexiglass, electrodos de acero inoxidable médicos.

- Alimentación: 220V – 50Hz
- 210W MAX (Fusibles 2x2A)
- Consumo: 15V
- Humedad: 80% sin condensación
- Dimensiones: 44x40x17cm
- Peso: 15kg

Aparato de Clase I – Tipo BF

FORMACIÓN GRATUITA

Uso, manejo y Protocolos de terapias



info@rebeccadennise.com



+34 91 622 79 33

Efectos de la Radio Frecuencia en Facial y Corporal

A diferencia de los rayos láser que son absorbidos por los cromóforos de la piel (es decir según el color de la piel), la Radiofrecuencia (RF) trabaja con la resistencia de los tejidos independientemente del tipo de piel. La longitud de onda a la que se trabaja con la Radio Frecuencia hace posible que esta penetre en la dermis y las capas sub-dérmicas protegiendo la epidermis.

Aunque la RF se ha empleado en medicina desde hace más de 70 años, sólo los desarrollos recientes han hecho posible emplear la RF para terapias estéticas.

La tecnología que incorpora **Energy Slim Master** nos permite realizar un procedimiento no invasivo que reafirman y renuevan el colágeno de la piel, regenerando el aspecto externo y tensando los tejidos internos que se hayan relajado.

La resistencia que provoca el **Slim Master** al ser aplicado hace que se produzca una elevación interna de la temperatura tisular: **Calor interno**. La respuesta al calor de un tejido es la vasodilatación, que se traduce en el incremento de la circulación. Esta hipertermia local produce la disminución de la viscosidad de los líquidos y coloides orgánicos lo que facilita los intercambios iónicos en el interior del organismo. **Este efecto calorífico interno es aprovechado para la lucha contra las adiposidades localizadas y en particular contra la celulitis, obteniendo espectaculares resultados en su tratamiento.**

Otro importante efecto que se produce con **Slim Master** es la **contracción del colágeno que activa la renovación y producción del colágeno profundo**. Esto acaba produciendo una reafirmación de la piel y una reducción evidente de las arrugas, descolgamientos y otros signos de envejecimiento cutáneo, efectos que en hacen del **Slim Master** la mejor alternativa para quienes no necesitan aún o no quieren someterse a un lifting quirúrgico.

Efectos de la Endermología Cromática

La **endermología cromática** del **SLIM MASTER** actúa directamente sobre el tejido graso subcutáneo estimulando la eliminación de toxinas, favoreciendo el funcionamiento veno-linfático y gracias a su **exclusiva masoterapia mendiente sistema vacuum**. Además de ablandar la celulitis conseguimos moldear y reafirmar el cuerpo a la vez que se pierde volumen, esto unido al nuevo sistema de **CROMOTERAPIA** harán que los resultados sean espectaculares.

MANDOS ENERGY SLIM MASTER

Mandos de serie:

- Radio Frecuencia con Endermología Cromática para corporal
- Radio Frecuencia para facial

Mandos de Opcionales:

- Radio Frecuencia para corporal
- Dermoabrasión Ultrasónica
- Cavitación

Existe la posibilidad de diseñar el equipo a medida, aumentando o sustituyendo mandos y terapias. Infórmese.

Atención al Cliente: +34 91 622 79 33 – info@rebeccadennise.com